




ACTISORB PLUS 25 opatrunek z węglem aktywowanym i srebrem

Opatrunek ACTISORB™ Plus 25 wykazuje skuteczne działanie przeciwko szerokiemu spektrum drobnoustrojów wywołujących zakażenie ran, w tym szczepów antybiotykoopornych, takich jak metycylooporny gronkowiec złocisty (ang. methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*, MRSA) i wankomycynooporne enterokoki (ang. vancomycin-resistant enterococci, VRE).

Dzięki usuwaniu nieprzyjemnych zapachów opatrunek ACTISORB™ Plus 25 umożliwia poprawę jakości życia zarówno pacjentów, jak i personelu pielęgniarstwa.

Ze względu na to, że występowanie nieprzyjemnego zapachu często wiąże się z obecnością wydzielin z rany, stosowanie opatrunku ACTISORB™ Plus 25 w połączeniu z odpowiednim opatrunkiem pomocniczym (na przykład TIELLE™) może ułatwić odprowadzanie wysięku i utrzymywanie wilgotnego środowiska gojenia się rany.

ACTISORB™ Plus 25 jest opatrunkiem składającym się z warstwy węgla aktywnego ze srebrem umieszczonej w koszulce z nieprzywierającego nylonu.

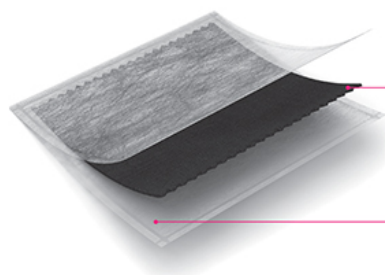

Węgiel aktywny ze srebrem

Koszulka z nieprzywierającej włókniny nylonowej wykonanej techniką spunbond

Działanie:

- oczyszcza rany zainfekowane i rany zagrożone infekcją
- pochłania nieprzyjemny zapach
- zewnętrzna siatka z włókien nylonu zapobiega przywieraniu opatrunku do rany



Węgiel aktywny
zatrzymuje zapach
wewnątrz opatrunku*



Węgiel aktywny wiąże bak-
terie i toksyny utrudniające
postęp procesu gojenia**6



Srebro zabija bakterie
obecne w opatrunku*

Wskazania:

- rany przewlekłe: odleżyny, owrzodzenia podudzi, stopa cukrzycowa,
- rany gojące się przez ziarninowanie,
- rany pourazowe i chirurgiczne,
- rany nowotworowe z zakażeniem grzybiczym,
- obszary, w których występuje zanieczyszczenie bakteriami,
- zakażenie lub nieprzyjemny zapach.

Mechanizm działania:

- aktywny węgiel pochłania nieprzyjemny zapach, bakterie i toksyny
- srebro zwalcza mikroorganizmy wewnątrz opatrunku

Aplikacja:

- rany zainfekowane: codzienna zmiana opatrunku, rany zagrożone infekcją: zmiana co 2-3 dni
- zwilżyć ACTISORB przed aplikacją (np. roztworem NaCl lub płynem Ringera)
- nie przecinać
- nakładać na ranę dowolną stroną
- można stosować z terapią kompresyjną
- ACTISORB może być nakładany na opatrunek nieprzywierający ADAPTIC
- zastosować opatrunek wtórny (np. TIELLE)

Opatrunku ACTISORB™ Plus 25 można używać jako podstawowego lub w połączeniu z innymi opatrunkami. Można go także umieszczać pod bandażami uciskowymi⁹.



Actisorb Plus 25		
rozmiar	ilość w opakowaniu	kod produktu
10,5 x 10,5 cm	10 szt	MAP105
19 x 10,5 cm	10 szt.	MAP190