

PRE-Klenz™

el zabezpieczaj cy
narz dzia przed wysychaniem
podczas transportu



STERIS®




*Produkt
rekomendowany przez
wiatow Organizacj Zdrowia
WHO
(World Health Organization)*

Unikalna formuła elu
zapobiegaj ca wysychaniu
zanieczyszcze organicznych na
powierzchni zabrudzonych narz dzi
oraz instrumentów medycznych

Pre-Klenz™ to gotowy do u ycia,
bakteriostatyczny el w formie bezaerozolowej
do wst pnego oczyszczania narz dzi w miejscu ich
u ycia oraz ich nawil ania podczas transportu.
Dzi ki swojej unikalnej formule poł czenia
surfaktantów i inhibitorów korozji nie tylko skutecznie
**zapobiega wysychaniu zanieczyszcze na narz dziach do
72 godzin**, ale równie poprawia efektywno dalszej
dekontaminacji.

Produkt posiada neutralne pH - 7,0 dzi ki czemu charakteryzuje go
wysoka kompatybilno materiałowa. Mo e by stosowany do delikatnych
elementów wykonanych z aluminium i innych mi kkich, wra liwych metali.
Przyczynia si do utrzymania wła ciwego stanu narz dzi i przedłu a ich ywotno .


Pre-Klenz™ mo e by u ywany do nawil ania **endoskopów sztywnych i gi tkich**.

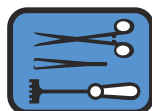

Narz dzia
chirurgiczne



Sprz t
anestezjologiczny

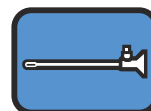

Instrumenty
mikrochirurgiczne



Kontenery
aluminiowe

Kompatybilność materiałowa

Produkt ten posiada szeroką kompatybilność z materiałami stosowanymi w produkcji narzędzi chirurgicznych. Zawiera także inhibitory korozji, które ograniczają uszkodzenie delikatnych elementów wykonanych z aluminium czy innych lekkich metali, przyczyniając się jednocześnie nie do utrzymania właściwej kondycji narzędzi oraz przedłużenia ich żywotności.

Bezpieczeństwo personelu, łatwość stosowania

PRE-Klenz™ dzięki swojej delikatnej formule jest bezpieczny oraz łatwy w zastosowaniu dla personelu. Postrysenie naniesiona w niewielkiej ilości na narzędzia nie wpływa na podniesienie ciśnienia zestawu oraz zmniejsza ryzyko ekspozycji personelu i w pełni eliminuje ryzyko rozlania co jest szczególnie w przypadku tradycyjnego wstępnego namaczania narzędzi.

Skuteczność działania

Formuła produktu zawierająca cegiełki powierzchniowo czynne, które zaraz po naniesieniu po zakończonym zabiegu rozpoczynają proces oczyszczania oraz utrzymują narzędzia w stanie wilgotnym podczas transportu. Produkt ten jest przeznaczony do stosowania na wszystkich rodzajach narzędzi i urządzeń chirurgicznych gdzie może spotkać krew, białko, tłuszcz oraz wszelkiego rodzaju trudne do usunięcia zanieczyszczenia lub gdzie mechaniczne usunięcie przez szorowanie nie jest możliwe.

Cechy i korzyści

Przeznaczony jest

Przylega do narzędzi utrzymując wilgoć podczas transportu do Centralnej sterylizacji. Zanieczyszczone ostre elementy narzędzi są widoczne przez przeźroczysty film. Tace nie są ciężkie ani nie ma ryzyka rozlania zanieczyszczonego roztworu co jest szczególnie podczas procedur wstępnych.

Gotowy do użycia

Myć można bezpośrednio w miejscu zastosowania narzędzi, nie ma potrzeby sporządzania roztworu. Produkt w wygodnej w użyciu lekkiej butelce z aplikatorem.

Nie zawiera barwników

Nie ma możliwości powstawania plam czy przebarwień na narzędziach czy innym sprzęcie.

Zawiera inhibitory korozji

Kompatybilny z materiałami wrażliwymi na korozję takimi jak uchwyty wykonane ze złota.

Zawiera środki powierzchniowo czynne

Rozpuszczają zanieczyszczenia i wspomagają proces mycia.

Łatwy do spłukania

Nie jest wymagane dodatkowe płukanie przed automatycznym procesem w myjni. W żaden sposób nie zakłóca pracy myjni.

Neutranal pH, przyjemny zapach

pH = 7,0 zapewnia szeroką kompatybilność materiałów.

PRE-Klenz™ jest zalecany dla aluminium czy innych lekkich metali. Delikatny kwiatowo-cytrynowy zapach nie wywołuje podrażnień.

Sposób użycia

1. Umieść narzędzia na tacy, lub w innym pojemniku używanym do transportu narzędzi. Upewnij się, że wszystkie narzędzia są otwarte.
2. Przekręć pokrętkę aplikatora z pozycji OFF do pozycji SPRAY.
3. Zaaplikuj 5-10 doz preparatu na brudne narzędzia. Przy dużej ilości narzędzi zaleca się spryskanie dna przedłożeniem narzędzi.
4. Przykryj tacę / pojemnik – narzędzia są gotowe do transportu.

Rozpuszczanie zanieczyszczeń

Przed aplikacją




10 minut po aplikacji

PRE-Klenz* przylega do powierzchni narzędzi zapewniając nawilżenie

Aplikacja początkowa

Po 30 sek. w pozycji pionowej

Pozostało na powierzchni

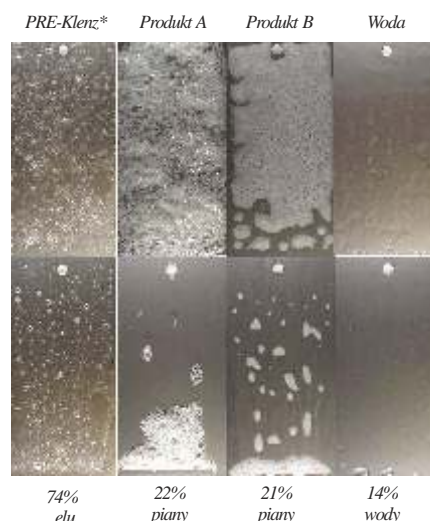

Kod / opakowanie

Kod produktu:

150377EC

Opis produktu:

PRE-Klenz™ – film do narzędzi

Zawartość opakowania:

12 x 650 ml

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od promieni słonecznych i działania wysokich temperatur. Okres przydatności 3 lata od daty produkcji.

Wyrób medyczny klasy I



Media-MED Sp. z o.o.

Dział Obsługi Klienta
ul. Lublaska 34, 31-476 Kraków
tel. (12) 413-94-90
fax: (12) 378-35-02
tel. kom. + 48 697-915-953
e-mail: biuro@media-med.pl
www.media-med.pl



STERIS®



STERIS Corporation

5960 Heisley Road
Mentor, OH 44060-1834, USA
440-354-2600
800-548-4873
www.steris.com



albert@media-med.pl