

Mycie wstępne endoskopów elastycznych oraz akcesoria pomocnicze

Uno-Flush®

- Zestaw do wstępnego mycia endoskopów bezpośrednio po zakończonym badaniu
- Nie zawierający enzymów płyn do płukania kanałów endoskopów elastycznych
- Specjalnie wyprofilowana gąbka do przecierania powierzchni endoskopu



Uno-Wipe®

- Gotowa do użycia, nasączona, odpowiednio ukształtowana gąbka do przecierania endoskopów po zakończonym badaniu



Valve-Basket®

- Praktyczny koszyk do mycia i dezynfekcji zastawek oraz akcesoriów endoskopowych



Uno-Flush®

Europejskie Towarzystwo Endoskopii Gastroenterologicznej (ESGE) zaleca rozpoczęcie procedury dekontaminacji endoskopu natychmiast po zakończonym badaniu pacjenta. Zanim endoskop zostanie odłączony od źródła światła oraz procesora obrazu należy niezwłocznie przepłukać kanały robocze roztworem umożliwiającym efektywne usunięcie wszelkich pozostałości organicznych.

Idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie nie zawierającego enzymów, w 100% biodegradowalnego płynu przeznaczonego do płukania kanałów endoskopowych oraz przecierania płaszcza endoskopu o nazwie Uno-Flush®. Unikalna mieszanina substancji zmniejszających napięcie powierzchniowe o doskonałej kompatybilności materiałowej, redukuje poziom zanieczyszczenia oraz zapobiega formowaniu się biofilmu w kanałach i na powierzchni endoskopu. Ponadto zapobiega powstawaniu piany oraz zawiera inhibitory korozji.



Kombinacja QAC oraz Triamin w roztworze Uno-Flush* niszczy strukturę komórki, wykazując skuteczność wobec: Bakterii - MRSA, TbC; Grzybów - Microsporum Gypseum; Spor bakterii - Clostridium Difficile; Wirusów - Norovirus w czasie do 2 minut.



Uno-Wipe®

Specjalnie wyprofilowana, nasączona roztworem Uno-Flash* gąbka przeznaczona do wstępnego przecierania endoskopów elastycznych i sztywnych.



Valve-Basket®



Zgodnie z zaleceniami, wszystkie akcesoria endoskopowe oraz zastawki powinny być procesowane w Automatycznej Myjni-Dezynfektorze razem z endoskopem, w skład którego wchodzi.

- Konstrukcja koszyka umożliwiającą swobodny przepływ płynów
- Łatwe zamykanie koszyka zapobiegające wypadnięciu zastawek
- Zapięcie mocujące koszyk do dedykowanego endoskopu

Jednostki sprzedaży

Nazwa produktu	Kod produktu
Uno-Flush - środek do wstępnego mycia endoskopów i płukania kanałów endoskopów elastycznych - 200 ml	105008
Uno-Flush - środek do wstępnego mycia endoskopów i płukania kanałów endoskopów elastycznych - 300 ml	105005
Uno-Flush - środek do wstępnego mycia endoskopów i płukania kanałów endoskopów elastycznych - 500 ml	105006
Uno-Wipe - gąbka do wstępnego przecierania powierzchni endoskopów elastycznych	105009
Valve Basket - Koszyk do mycia i dezynfekcji zastawek oraz akcesoriów endoskopowych	105001