


BUDOWA OPATRUNKU

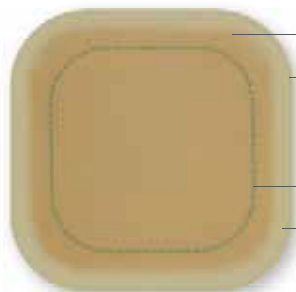

- Zewnętrzna, wodoodporna warstwa błony poliuretanowej
- Warstwa kontaktowa - kompozycja trzech hydrokoloidów (karboksymetyloceluloza sodowa, pektyna, żelatyna) na podłożu samoprzylepnego polimeru
- Zielona linia sygnalizatora
- Krawędzie opatrunku, znacznie cieńsze niż centralna część

Postać produktu:

Sterylny opatrunek hydrokoloidowy

DZIAŁANIE:

- Zapewnia optymalne, wilgotne środowisko gojenia oraz izoluje termicznie ranę, przez co procesy naprawy uszkodzonych tkanek przebiegają szybciej.
- W kontakcie z wydzieliną tworzy miękki żel, który wypełnia dno rany, idealnie dopasowuje się do niego, chroni zakończenia nerwowe, przez co zmniejsza dolegliwości bólowe i ułatwia oczyszczanie rany.
- Obniża pH, stymulując aktywność makrofagów i minimalizując ryzyko zakażenia.
- Wodoodporny – zapewnia ochronę przed dostępem patogenów i zanieczyszczeń z zewnątrz.
- Nie przywiera do rany, można go łatwo usunąć.
- Jest miękki, elastyczny, a cienka zielona linia (sygnalizator) ułatwia uchwycenie optymalnego momentu zmiany opatrunku.

WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA:

Rany suche, bez infekcji:

- owrzodzenia podudzi na tle niewydolności żyłnej i tętniczej, odleżyny, zespół stopy cukrzycowej;
- rany ostre płytkie oraz otarcia skóry, rany pourazowe, rany po opracowaniu chirurgicznym;
- oparzenia skóry pośredniej grubości (I-II stopień) oraz miejsca pobrania skóry do przeszczepu;
- rany z martwicą suchą (w ranach powierzchniowych - jako opatrunek pierwotny, a w ranach głębokich - jako wtórny);
- jako opatrunek wtórny, we wszystkich rodzajach ran, po uprzednim zastosowaniu odpowiedniego opatrunku pierwotnego.

DZIAŁANIE OPATRUNKU



Dzień 1



Dzień 2



Dzień 6

Sygnalizator ułatwia uchwycenie właściwego momentu zmiany opatrunku. Kiedy wysięk doirze do zielonej linii sygnalizatora, opatrunek należy zmienić.



Można przycinać



Łatwy w aplikacji i usuwaniu



Stanowi ochronę przed bakteriami i wirusami z zewnątrz



Maksymalny rekomendowany czas pozostawiania na ranie - do 7 dni



Wodoodporny

WARTO WIEDZIEĆ:

- Opatrunek może być przycinany w dowolnym kierunku bez utraty jego właściwości.
- W ranach powierzchownych zakładać tak, by pokrywał 1 do 2 cm skóry zdrowej wokół rany (w celu dobrego przyklejenia).
- Nie stosować w ranach z cechami infekcji chyba, że opatrunek pierwotny ma działanie bakteriobójcze.
- Specyficzna reakcja hydrokoloidów z wilgocią z rany powoduje powstawanie żółtawego żelu w ranie, o charakterystycznym nieprzyjemnym zapachu, który niekiedy może być mylnie uznany za ropę, - jest to jednak zjawisko całkiem normalne. Żelu ubywa wraz z postępem gojenia, daje się go łatwo usunąć przez przepłukanie rany sterylnym roztworem soli fizjologicznej (0,9 % NaCl) lub antyseptykiem. Żel ten przybiera formę pęcherza w kolorze mlecznym lub mleczno-żółtawym, pod powierzchnią opatrunku, jeśli pęcherz przekroczy poza przerywaną linię sygnalizatora zmiany opatrunku, należy opatrunek zmienić. Przy minimalnym wysięku pęcherz może być niewidoczny.
- Czasami po pierwszych zmianach opatrunku rana może się pozornie powiększać – nie jest to jednak objaw negatywny, świadczy on o oczyszczaniu rany z tkanek martwicznych.
- W celu usunięcia opatrunku należy delikatnie ucisnąć skórę z opatrunkiem jedną ręką i ostrożnie podnieść krawędź opatrunku drugą ręką. Następnie delikatnie rozciągnąć opatrunek, aby utracił przyleganie do skóry, a następnie go zdjąć.

Czas pozostawiania na ranie:

Maksymalnie do 7 dni, ale zawsze jest to uzależnione od obrazu klinicznego i ilości wysięku.

Granuflex® Signal			
	Dostępne rozmiary	Nr katalogowy	Liczba sztuk w opak.
	10x10 cm	403326	5
	14x14 cm	403327	5
	18,5x19,5 cm - pięta	410500	5
	20x20 cm	403328	5
	20x22,5 cm - kość krzyżowa	410501	5

Możliwe połączenia produktu z innymi opatrunkami:

Jako opatrunek wtórny dla: Granuflex® pasta, GranuGel®.

W ranach z większym wydzielaniem, jako opatrunek wtórny dla: AQUACEL® Ag+ EXTRA™, AQUACEL® Ag, AQUACEL® Ag EXTRA™, AQUACEL® lub AQUACEL® EXTRA™.

