

BUDOWA OPATRUNKU



Warstwa kontaktowa - kompozycja trzech hydrokoloidów (karboksymetyloceluloza sodowa, pektyna, żelatyna) na podłożu samoprzylepnego polimeru

Zewnętrzna, wodoodporna warstwa błony poliuretanowej

Postać produktu:

Sterylny opatrunek hydrokoloidowy

DZIAŁANIE:

- Zapewnia optymalne, wilgotne środowisko gojenia oraz izoluje termicznie ranę, przez co procesy naprawy uszkodzonych tkanek przebiegają szybciej.
- W kontakcie z wydzieliną tworzy miękki żel, który wypełnia dno rany, idealnie dopasowuje się do niego, chroni zakończenia nerwowe, przez co zmniejsza dolegliwości bólowe i ułatwia oczyszczanie rany.
- Obniża pH, stymulując aktywność makrofagów i minimalizując ryzyko zakażenia.
- Wodoodporny – zapewnia ochronę przed dostępem patogenów i zanieczyszczeń z zewnątrz.
- Nie przywiera do rany, można go łatwo usunąć.
- Jest miękki, elastyczny oraz bardzo cienki i półprzezroczysty, dzięki czemu łatwo można monitorować ranę oraz zaopatrzyć nim miejsca nawet bardzo trudno dostępne.

WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA:

Rany suche, bez infekcji, bez wysięku:

- owrzodzenia podudzi na tle niewydolności żyłnej i tętniczej, odleżyny, zespół stopy cukrzycowej;
- rany ostre płytkie oraz otarcia skóry, rany pourazowe, rany po opracowaniu chirurgicznym;
- oparzenia skóry pośredniej grubości (I-II stopień) oraz miejsca pobrania skóry do przeszczepu;
- rany z martwicą suchą (w ranach powierzchniowych - jako opatrunek pierwotny, a w ranach głębokich - jako wtórny);
- jako opatrunek wtórny, we wszystkich rodzajach ran, po uprzednim zastosowaniu odpowiedniego opatrunku pierwotnego.

APLIKACJA
OPATRUNKU



ZASTOSOWANIE
OPATRUNKU





Miękki, delikatny,
elastyczny
i komfortowy



Można
przycinać



Łatwy
w aplikacji
i usuwaniu



Stanowi ochronę
przed bakteriami
i wirusami
z zewnątrz



Maksymalny
rekomendowany
czas pozostawiania na ranie
- do 7 dni






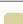

Wodoodporny

WARTO WIEDZIEĆ:

- Opatrunek może być przycinany w dowolnym kierunku bez utraty jego właściwości.
- W ranach powierzchniowych zakładać tak, by pokrywał 1 do 2 cm skóry zdrowej wokół rany (w celu dobrego przyklejenia).
- Nie stosować w ranach z cechami infekcji chyba, że opatrunek pierwotny ma działanie bakteriobójcze.
- Specyficzna reakcja hydrokoloidów z wilgocią z rany powoduje powstawanie żółtawego żelu w ranie, o charakterystycznym kwaśnym zapachu, który niekiedy może być mylnie uznany za ropę – jest to jednak zjawisko całkiem normalne. Żelu ubywa wraz z postępowaniem gojenia, daje się go łatwo usunąć przez przepłukanie rany sterylnym roztworem soli fizjologicznej (0,9 % NaCl) lub antyseptykiem.
- Żel ten przybiera formę pęcherza w kolorze mlecznym, lub mleczno-żółtawym, pod powierzchnią opatrunku, opatrunek należy zmienić, gdy pęcherz z wysiękiem (wybrzuszenie) zbliży się do brzegów opatrunku.
- Czasami po pierwszych zmianach opatrunku rana może się pozornie powiększać – nie jest to jednak objaw negatywny, świadczy on o oczyszczaniu rany z tkanek martwicznych.
- W celu usunięcia opatrunku należy delikatnie ucisnąć skórę z opatrunkiem jedną ręką i ostrożnie podnieść krawędź opatrunku drugą ręką. Następnie delikatnie rozciągnąć opatrunek, aby utracił przyleganie do skóry, a następnie go zdjąć.

Czas pozostawiania na ranie:

Maksymalnie do 7 dni, ale zawsze jest to uzależnione od obrazu klinicznego i ilości wysięku.

Granuflex® Extra Thin			
Dostępne rozmiary	Nr katalogowy	Liczba sztuk w opak.	
 5x10 cm	187959	10	
 5x20 cm	187961	10	
 7,5x7,5 cm	187951	5	
 10x10 cm	187954	5	
 15x15 cm	187956	5	

Możliwe połączenia produktu z innymi opatrunkami:

Jako opatrunek wtórny dla: Granuflex® pasta, GranuGEL®.

W ranach z większym wydzieleniem, jako opatrunek wtórny dla: AQUACEL® Ag+ EXTRA™, AQUACEL® Ag, AQUACEL® Ag EXTRA™, AQUACEL® lub AQUACEL® EXTRA™.

