

Opatrunek do ran z wysiękiem i podatnych na uszkodzenie – piankowy z silikonową warstwą kontaktową



BUDOWA OPATRUNKU



Postać opatrunku:

występuje w wersji przylepnej



DZIAŁANIE

- Warstwa zewnętrzna stanowi wodoodporną barierę przeciw wirusom, bakteriom i innym drobnoustrojom, chroniąc przed kontaminacją i pomagając minimalizować ryzyko infekcji.⁵⁰
- Pochłanianie wysięku, wspomagając utrzymanie wilgotnego środowiska gojenia.⁵⁰
- Powierzchnia stykająca się z raną pokryta perforowaną, delikatną warstwą silikonową pomaga zapewnić przyjazne i delikatne przyleganie do skóry.⁵⁰
- Odpowiedni dla kruchej skóry.⁵¹
- Łatwy w użyciu, zmianie pozycji po aplikacji, atraumatyczny dla rany i otaczającej skóry.^{50, 51}



WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA⁵²

- Rany z małym wysiękiem, takie jak np.:
- owróżdzenia gołeni, odleżyny, zespół stopy cukrzycowej
 - rany chirurgiczne (np. rany pooperacyjne pozostawione do gojenia wtórnego przez ziarninowanie i miejsc pobrania skóry do przeszczepu)
 - oparzenia pośredniej grubości (II stopnia)
 - rany urazowe (np. otarcia, rany szarpane, pęcherze, drobne zadrapania, uszkodzenia skóry).

Przykłady zastosowania:



chirurgia naczyniowa

chirurgia dermatologiczna

chirurgia plastyczna



WARTO WIEDZIEĆ⁵²

- Położenie opatrunku można zmieniać w czasie aplikacji (można go odklejać i ponownie przyklejać w celu poprawy położenia, bez utraty jego właściwości przylepnych).
- Opatrunek może być przycinany w dowolnym kierunku, należy jednak zastosować dodatkowe umocowanie (bandaż lub przylepiec), aby opatrunek utrzymywał się na ranie. Trzeba pamiętać, że w przypadku docinania bariera ochronna przeciw wirusom/bakteriom oraz wodoszczelność może zostać naruszona.
- Warstwa chłonna powinna pokrywać skórę na obszarze co najmniej 1 cm wokół rany.

Czas pozostawiania na ranie:

Maksymalnie do 7 dni⁵³, ale zawsze jest to uzależnione od obrazu klinicznego i ilości wysięku.

FoamLite[™] ConvaTec

Dostępne rozmiary	Rozmiar warstwy chłonnej	Nr katalogowy	Liczba sztuk w opakowaniu
8x8 cm	5x5 cm	421557	10
10x10 cm	6,5x6,5 cm	421559	10
15x15 cm	11x11 cm	421561	10
5,5x12 cm	2,5x9,5 cm	421563	10
10x20 cm	6,5x14,5 cm	421928	10



Można przycinać⁵⁴



Łatwy w aplikacji i usuwaniu^{54, 51}



Wodoodporny⁵²



Stanowi ochronę przed bakteriami i wirusami z zewnątrz⁵²



Miękki, delikatny, elastyczny i komfortowy⁵⁴



Maksymalny rekomendowany czas pozostawiania na ranie - do 7 dni⁵³