



Doskonały efekt hemostatyczny poprzez kompresję po usunięciu igieł

Po wyjęciu igły (rozmiar 14G-18G) do pobierania krwi lub hemodializy itp.

STEPTY™ zapewnia doskonały efekt hemostatyczny poprzez kompresję wkładką chłonną o grubości 6 mm, która wchłania krew, oraz plaster z włókna uretanowego, który ma odpowiednią elastyczność.

Specyfikacje

Kod produktu	Rozmiar		w pudełku
	Plaster	Wkładka (6mm)	
No.80	39mm×80mm	27mm×15mm	50 szt
No.80A	39mm×80mm	27mm×15mm	50 szt



Higieniczna kompresja

STEPTY™ jest indywidualnie pakowany i sterylizowany, może być używany do hemostazy higienicznie, oszczędza czas opieki.

Cechy

4-warstwowa wkładka o grubości 6 mm

- Doskonała chłonność krwi.
- Zapewnia skuteczny efekt hemostatyczny dzięki elastycznemu plasterowi
- **Owalny kształt o szerokości wzdłużnej 27mm**
- Zakrywa zarówno nakłuwane miejsce na skórze, jak i na naczyniu krwionośnym.
- Owalny kształt jest delikatny dla skóry.

Elastyczny i giętki plaster z włókniny uretanowej


- Elastyczność plastra zapewnia skuteczną kompresję.
- Owijając wkład chłonny we wszystkich kierunkach, zapobiega jego przemieszczeniu.
- Hipoalergiczny klej akrylowy.

- Aby ułatwić użytkowanie w rękawiczkach, złożona część wkładki została powiększona.


Użycie

- Hemostaza i opatrywanie żył obwodowych po pobraniu krwi, transfuzji lub wlewie, hemodializie.


Instrukcje

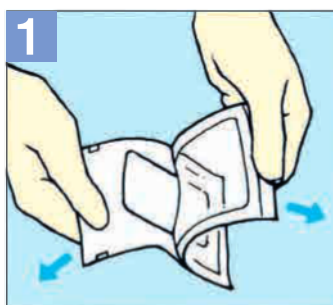


Pociągnij w kierunku strzałki, aby otworzyć wysterylizowane opakowanie i wyjmij **STEPTY™**. Odwróć stronę z przezroczystą folią tak, aby była skierowana do góry, i pociągnij od środkacewnika znajdował się na środku obszaru usuwania folii, aby ułatwić jej otwieranie.

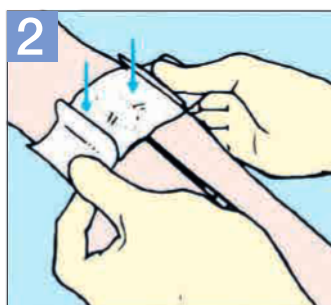

Bezpośrednio przed wyjęciem igły lub cewnika wyrównać długą oś podkładki z biegiem naczynia krwionośnego, nałożyć podkładkę tak, aby punkt wkłucia igły lub cewnika znajdował się na środku podkładki i lekko nacisnąć podkładkę, aby ją przytrzymać w miejscu.

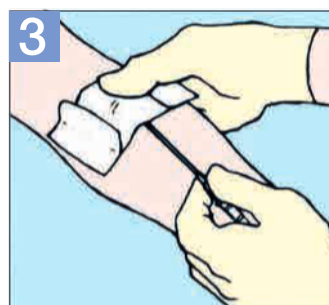

Delikatnie naciskając palcem (kciukiem) na wkładkę, wyciągnij igłę lub cewnik.

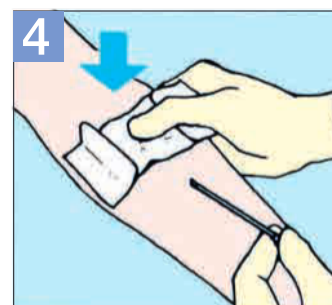

Wyciągając igłę lub cewnik, mocno dociśnij poduszkę palcem (kciukiem).



Kontynuując mocny nacisk, aby podkładka się nie zsunęła, rozciągnij taśmę samoprzylepną na szerokość kciuka i przymocuj ją bezpiecznie do skóry.



Uważaj, aby nie poruszyć podkładki, gdy zmieniasz palec uciskający na drugi kciuk i kontynuuj wywieranie silnego nacisku.





Kontynuując mocny nacisk, aby podkładka się nie ześlizgnęła, naciągnij taśmę samoprzylepną po przeciwnej stronie na szerokość kciuka i przymocuj ją bezpiecznie do skóry.



Wygląd **STEPTY™** po nałożeniu. Podkładkę mocuje się na miejscu poprzez owinięcie taśmą.

Środki ostrożności

- Używać wyłącznie do żył obwodowych.
- Aby uniknąć podrażnienia skóry, nie należy naciagać opatrunku bardziej, niż jest to konieczne, i należy go zdjąć nie później niż po 2 godzinach stosowania.
- Aby uniknąć uszkodzenia żył i skóry, należy wyjąć igłę lub cewnik przed nałożeniem tego produktu na skórę.
- Jeśli widoczny jest wyciek krwi, należy natychmiast wymienić produkt.
- W razie wystąpienia problemów skórnych (wysypka, zaczerwienienie, powstawanie pęcherzy, łuszczenie się skóry, świąd itp.) lub gdy podejrzewane jest zakażenie, nie należy stosować produktu lub należy przerwać jego stosowanie
- Po użyciu produkt należy powoli oderwać.

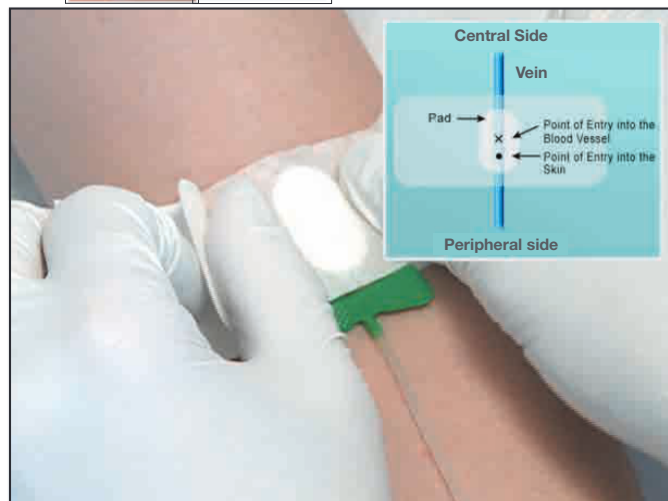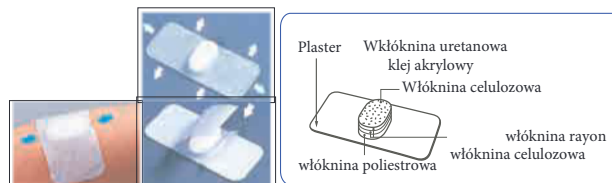

Zeskanuj kod QR